

Checklist opstarten en afsluiten van de MH & PA kamers

DATUM:

KAMERNR:

Kamer opstarten	Toelichting (alleen indien nodig)	 (initialen invullen)
Waterslangen doorspoelen		
Afzuigers doorspoelen		
Unit, lamp en werkblad afnemen met alcohol		
Zeefje van afzuiger terugplaatsen		
O-ringen van afzuigers eventueel invetten met vaseline		
Tray met benodigdheden klaarzetten		
Sleeves om kleine afzuiger en meerfunctiespuit		
EMS handstuk afplakken met beschermtape		
Polijsst hoekstuk en EMS handstuk		
Computer opstarten		
Eventueel airco aan		

Controle op aanwezigheid bij opstarten	Toelichting (alleen indien nodig)	 (initialen invullen)
Zeefje afzuigers + spittoon		
EMS tips (8 per kamer: 4 x P, 4 x PS)		
Volle fles waterstofperoxide		
Electrische tandenborstel en opzetstukjes		
Handspiegel		
Voorraad kasten & lades controleren NB Niet volledig? Vul aan en noteer hiernaast wat je mist		

Checklist opstarten en afsluiten van de MH & PA kamers

Kamer afsluiten	Toelichting (alleen indien nodig)	 (initialen invullen)
Vuile instrumentarium naar de sterie brengen		
Tandenborstel terug op lader zetten		
Stoel doorspoelen door afzuigers op volle fles te zetten		
Unit, lamp en werkblad afnemen met alcohol		
Stoel schoonmaken met daarvoor bestemde reinigingsspray		
Afzuigers na het spoelen in sterilisatiezakje naar sterie		
Hoekstukken in sterilisatiezakje naar sterie		
Zeefjes afzuiger & spittoon afspoelen met water en in bakje water leggen		
Computer uit (let op scherm + muis)		
Airco uit		
Unit uit		
EMS tips tellen		
Vuilnisbakken legen (indien er geen schoonmaak aanwezig is)		
Vloeren dweilen (indien er geen schoonmaak aanwezig is)		

Controle op aanwezigheid bij afsluiten	Toelichting (alleen indien nodig)	 (initialen invullen)
Zeefje afzuigers + spittoon		
EMS tips (8 per kamer: 4 x P, 4 x PS)		
Volle fles waterstofperoxide		
Electrische tandenborstel en opzetstukjes		
Handspiegel		
Voorraad controleren + aanvullen voor volgende dag (zie checklist voorraad kamers MH/PA op PD>Doc&Prot>Checklists (nw)) NB Afvinken = alles gecontroleerd!		